

Gebrauchsanleitung


Sitzkissen RG 35 / RG 40 / VB 100



Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Hilfsmittels die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch!

Die Sitzkissen RG 35 / RG40 / VB100 sind Standard-Sitzkissen und individuell einsetzbar. Sie bieten angenehmen Sitzkomfort ob als Rollstuhl-Grundausrüstung oder im alltäglichen Bereich.

Anwendung

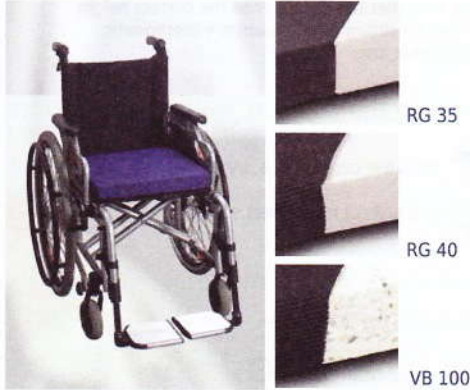

Vor dem Platzieren des Kissens folgendes beachten:

1. Der Reißverschluss sollte zum Stuhlrücken liegen.
2. Die Seite mit dem Unterboden Noppe auf die Sitzfläche legen.
3. Prüfen, ob das Kissen die richtige Größe und Höhe hat.



Ein Sitzkissen mit Unterboden Noppe (Antirutsch) verhindert ein Wegrutschen des Kissens!

Indikation

Die Kissen können als allgemeine Verbesserung des Sitzkomforts oder als Sitzerrhöhung genutzt werden.

Es liegen keine Gegenanzeigen vor.

Die Sitzkissen sind unsterile Hilfsmittel.

Sicherheitshinweise

Achten Sie darauf, dass das Kissen die richtige Höhe für Sie hat. Beim Durchsitzen des Schaumstoffes geht der therapeutische Nutzen dadurch verloren.

Lagerungshinweis



(trocken lagern)



(vor Sonnenlicht schützen)

Pflegeanleitung / Material



Schaumstoffkern nicht waschen!

Bezüge je nach Ausführung waschbar (siehe Wäscheetikett)

Schaumstoffkern je nach Auswahl:

RG35:	Raumgewicht 35 kg/m ³ Stauchhärte 55 kPa/cm ²
RG40:	Raumgewicht 40 kg/m ³ Stauchhärte 70 kPa/cm ²
VB100:	Raumgewicht 100 kg/m ³

Flachgewebe:	Polyester
Möbelvelours:	Polyester
Nässeschutz:	Polyester/Polyamid
Trevira CS:	Polyamid
Abstandsgewirke:	Polyester
Noppe:	Polyester/Polyamid
Reißverschluss:	Polyester
Nähgarn:	Polyester

